


2019-nCoV Antigen Test - szybki test kasetkowy (wymaz)



2019-nCoV Antigen Test szybki test kasetkowy (wymaz) jest szybkim testem immunochromatograficznym przeznaczonym do jakościowego wykrywania i rozróżniania antygenów wirusa COVID-19 w próbkach z wymazów z: jamy nosowo-gardłowej oraz jamy ustno-gardłowej, służącym jako pomoc w diagnostyce infekcji chorób dróg oddechowych. Test przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego; do diagnostyki *in vitro*.

NAZWA	2019-nCoV Antigen Test szybki test kasetkowy (wymaz)
NUMER KATALOGOWY	W196P0010
RODZAJ PRÓBK	Wydzielina z: jamy nosowo-gardłowej, z jamy ustno-gardłowej
ELEMENTY ZESTAWU	20 kaset testowych, 20 probówek z buforem i końcówką pipetującą, 20 wymazówek, statyw, instrukcja użycia
CZUŁOŚĆ	98,11%
SWOISTOŚĆ	99,72%
METODA REFERENCYJNA	RT-PCR
DOKŁADNOŚĆ	99,13%
CZAS ODCZYTU	15-20 minut

SCHEMAT UŻYCIA I INTERPRETACJA WYNIKÓW

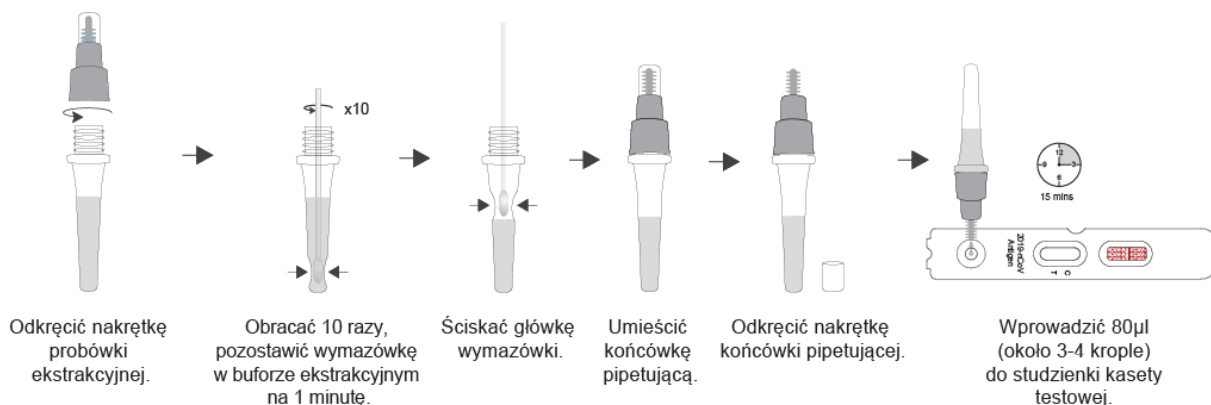

1. Odkręcić nakrętkę probówki ekstrakcyjnej.
2. Umieścić wymazówkę z pobraną próbką w probówce ekstrakcyjnej. Obracać 10 razy dociskając do dna i ścianek probówki ekstrakcyjnej. Pozostawić wymazówkę w buforze ekstrakcyjnym na 1 minutę.
3. Wyciągnąć wymazówkę ściskając ścianki probówki ekstrakcyjnej aby uwolnić jak najwięcej płynu z wymazówki.
4. Umieścić końcówkę pipetującą.
5. Odkręcić nakrętkę końcówki pipetującej.
6. Trzymając probówkę pionowo wprowadzić około 3-4 krople próbki do studzienki (S) kasety testowej. Włączyć minutnik.
7. Odczytać wynik między 15-20 minutą.