



SARS-CoV-2 & GRYPA A/B & RSV ANTIGEN COMBO szybki test kasetkowy (wymaz)

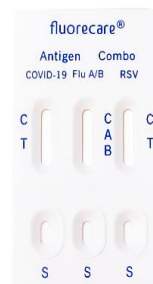

SARS-CoV-2 & GRYPA A/B & RSV ANTIGEN COMBO szybki test kasetkowy (wymaz) jest szybkim testem immunochromatograficznym przeznaczonym do jakościowego wykrywania i rozróżniania antygenów wirusów: SARS-CoV-2, Grypa A, Grypa B i RSV w próbkach z wymazów z: jamy nosowo-gardłowej, nosa oraz jamy ustno-gardłowej, służącym jako pomoc w diagnostyce infekcji chorób dróg oddechowych. Test przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego; do diagnostyki *in vitro*.

NAZWA	SARS-CoV-2 & GRYPA A/B & RSV ANTIGEN COMBO szybki test kasetkowy (wymaz)
NUMER KATALOGOWY	MF-71
RODZAJ PRÓBK	Wydzielina z: jamy nosowo-gardłowej, nosa, z jamy ustno-gardłowej
ELEMENTY ZESTAWU	25 kaset testowych, 25 probówek z buforem i końcówką pipetującą, 25 wymazówek, statyw, instrukcja użycia
CZUŁOŚĆ	SARS-CoV-2: wymaz z jamy nosowo-gardłowej 94,05%; wymaz z nosa 93,00%; wymaz z jamy ustno-gardłowej 91,00%; Grypa A: wymaz z jamy nosowo-gardłowej 95,24%; wymaz z nosa 85,00%; wymaz z jamy ustno-gardłowej 95,00%, Grypa B: z jamy nosowo-gardłowej 100,00%, wymaz z nosa 95,00%, wymaz z jamy ustno-gardłowej 85,00%, RSV: z jamy nosowo-gardłowej 100,00%; wymaz z nosa 92,31%; wymaz z jamy ustno-gardłowej 100,00%
SWOISTOŚĆ	SARS-CoV-2: wymaz z jamy nosowo-gardłowej 100,00%; wymaz z nosa 100,00%; wymaz z jamy ustno-gardłowej 100,00%; Grypa A: wymaz z jamy nosowo-gardłowej 100,00%; wymaz z nosa 99,28%; wymaz z jamy ustno-gardłowej 100,00%, Grypa B: wymaz z jamy nosowo-gardłowej 100,00%, wymaz z nosa 100,00%, wymaz z gardła: 100,00%, RSV: wymaz z jamy nosowo-gardłowej 100,00%; wymaz z nosa 100,00%; wymaz z jamy ustno-gardłowej 100,00%
METODA REFERENCYJNA	RT-PCR
CZAS ODCZYTU	12 minut

SCHEMAT UŻYCIA I INTERPRETACJA WYNIKÓW

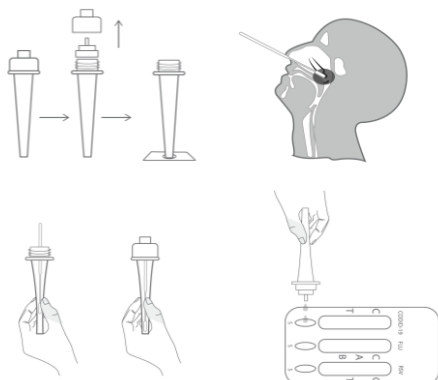

1. Pobrać wymazówką dołączoną do zestawu wydzielinę z nosa, nosogardła lub gardła.
2. Umieścić wymazówkę z pobranym materiałem w probówce ekstrakcyjnej, obracać energicznie 15 razy, złamać ją w punkcie przecięcia i pozostawić na 1 minutę.
3. Otworzyć nakrętkę końcówki pipetującej i dodać po **2 pełne krople roztworu** do każdej z trzech studzienek S kasety testowej.
4. Odczytać wynik w **12. minucie**.