

KARTA PRODUKTU

Produkt:

Strzygarka chirurgiczna z nieruchomą głowicą i wymiennymi ostrzami



Opis produktu

Strzygarka (bez ładowarki) – nr katalogowy 9681

Ładowarka do strzygarki – nr katalogowy 9683

Ostrza do strzygarki – nr katalogowy 9680

Strzygarka chirurgiczna z nieruchomą głowicą jest bezprzewodową, akumulatorową strzygarką z wymiennymi ostrzami z pięciostopniowym ledowym wskaźnikiem naładowania baterii. Oddzielna ładowarka zawiera przewód elektryczny do podłączenia strzygarki podczas ładowania.

Podstawowe właściwości i zalety

- Bardzo niski współczynnik zacięć (poniżej 5% - Badanie 3M: EM-05-01363)
- Akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania, z zabezpieczeniem przed przeładowaniem
- Zapewnia 160 minut ciągłej pracy po pełnym ładowaniu
- Czas ładowania w pełni rozładowanej baterii – 3 godziny
- Ergonomiczny kształt zapewnia dobry i bezpieczny chwyt podczas pracy
- 5-stopniowy ledowy wskaźnik naładowania
- Przycisk do bezdotykowego zwolnienia ostrza
- Możliwość zanurzenia w płynie dezynfekującym na głębokość 15 cm na czas do 15 minut umożliwia różne techniki czyszczenia i dezynfekcji (opłukanie, zanurzenie, spryskanie).

KARTA PRODUKTU

Wskazania do użycia

3M Strzyżarka chirurgiczna jest stosowana do usuwania owłosienia ze skóry pacjentów przed zabiegami operacyjnymi i innymi zabiegami inwazyjnymi. Strzyżarka całkowicie zastępuje tradycyjną golarkę, eliminując jednocześnie ryzyko uszkodzenia skóry związane z goleniem. 3M strzyżarka chirurgiczna usuwa owłosienie szybko i dokładnie. 3M strzyżarka chirurgiczna może być stosowana do usuwania zarówno grubych jak i delikatnych włosów. Może być bezpiecznie stosowana nawet w delikatnych okolicach ciała.

Sposób użycia

Umieszczanie ostrza na strzygarce:

- Upewnij się, że strzyżarka jest wyłączona (wyłącznik ON/OFF jest w pozycji OFF). Po zdjęciu wierzchniej osłony blistra ostrza (nie dotykając samego ostrza), chwycić trzon strzyżarki i wsunąć ostrze strzyżarki do przeznaczonego na niego miejsca aż rozlegnie się odgłos kliknięcia.

Używanie strzyżarki:

- Włącz strzyżarkę przez przesunięcie wyłącznika ON/OFF w pozycję ON. Trzymaj strzyżarkę bezpośrednio nad skórą pacjenta pod kątem 15-30°. Strzyż skórę krótkimi, łagodnymi ruchami. W celu dokładnego usunięcia owłosienia strzyż skórę w kierunku pod włos. Naciągaj skórę w przypadku strzyżenia fałd skórnych.

Wymiana ostrzy:

- Wyłącz strzyżarkę (wyłącznik ON/OFF w pozycji OFF). Trzymaj strzyżarkę w jednej dłoni. Trzymaj strzyżarkę nad zbiornikiem na odpadki ostre. Za pomocą kciuka wciśnij przycisk zwolnienia ostrza i wyrzuć je do pojemnika na odpady ostre.

UWAGA: aby wyeliminować ryzyko zakażenia krzyżowego zmieniaj ostrze po każdorazowym użyciu

Ładowanie strzyżarki:

- Przesuń wyłącznik ON/OFF do pozycji OFF
- Oczyść strzyżarkę przed przystąpieniem do jej ładowania.
- Podłącz ładowarkę do strzyżarki a następnie podłącz ładowarkę do właściwego źródła napięcia.
- Podczas ładowania lampki LED będą migać wskazując jej ładowanie. Poziom naładowania można określić za pomocą migającej w tym czasie lampki.
- W celu upewnienia się, że strzyżarka jest właściwie naładowana; należy ładować ją przez 3 godziny przed pierwszym użyciem.
- Zalecamy pozostawienie strzyżarki podłączonej do źródła napięcia pomiędzy kolejnymi użyciami.

Ostrze (9680):

Jednorazowe, uniwersalne, bezpieczne ostrze zapobiegające pociągnięciu skóry w kierunku części tnącej, przeznaczone do każdego rodzaju owłosienia

- szerokość ostrza – 4,5 cm
- szerokość cięcia 4,2 cm.
- ruchoma górna krawędź tnąca ostrza
- nieruchoma dolna (stykająca się ze skórą) krawędź ostrza
- wysokość strzyżenia <0,3 mm (zależy od techniki strzyżenia, ułożenia, grubości włosów itp)
- oznaczenie numeru serii na każdym ostrzu
- indywidualne higieniczne opakowanie zapewniające bezdotykowe założenie na głowicę strzyżarki

Opakowanie: 50 szt

KARTA PRODUKTU

Specyfikacja

Napięcie pracy:	3,6 volt prąd stały Prąd bez obciążenia: 1,0 amps.max Prąd z pełnym obciążeniem: 1,3 amps.max Obroty: 5500-6000
Obwód ładujący:	100-240 V prąd zmienny 50-60 Hz
Czas ładowania:	3 godziny
Czas pracy ciągłej:	160 minut
Akumulator:	Litowo-jonowy (Li-Ion)
Ciężar (z ostrzem):	180 g
Wymiary (z ostrzem):	
Długość strzygarki –	15,5 cm
Szerokość cięcia 9680 –	4,2 cm

Gwarancja

Producent udziela gwarancji jakościowej na produkt na okres 2 lat od daty sprzedaży. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowej obsługi i użycia, uszkodzenia mechanicznego z winy użytkownika i jakiegokolwiek modyfikacje urządzenia.

Pielęgnacja i czyszczenie trzonu strzygarki:

Obudowa trzonu strzygarki jest zbudowana z trwałego plastiku i jest wodoodporna. Można ją wycierać za pomocą wilgotnej szmatki zawierającej niewielką ilość alkoholu, środka dezynfekującego lub roztworu łagodnego środka czyszczącego. Można ją także płukać pod bieżącą wodą lub zanurzać w roztworze środka dezynfekującego wysokiego poziomu. Zatwierdzone środki chemiczne stosowane do czyszczenia to alkohol 70%, wybielacz 2%, aldehyd glutarowy, czwartorzędowy chlorek amonu i roztwory Chlor-clean. Przed ponownym umieszczeniem strzygarki w ładowarce lub ponownym użyciem należy pozostawić ją do całkowitego wyschnięcia. Nie sterylizować korpusu strzygarki lub zespołu ostrzy.