

3M™ Tegaderm™

Optymalny opatrunek do każdego wktucia



Niezastąpiona
jakość

od ponad 30 lat

3M


3M™ Tegaderm™ IV. Advanced

Zaawansowane opatrunki przezroczyste o udowodnionej wysokiej stabilizacji kaniul i cewników naczyniowych i wydłużające czas ich utrzymywania w żyłę.

- wzmocnione obrzeże z mikronacięciami
- laminowane niebrudzące paski mocujące i metki do oznaczenia
- komfortowy klej
- wysoka przepuszczalność dla pary wodnej




1681 | 7 x 8 cm

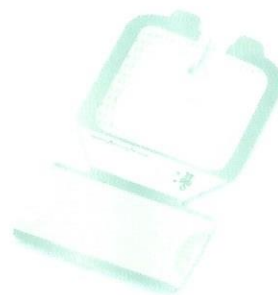


1683 | 6,5 x 7 cm



1685 | 8,5 x 11,5 cm

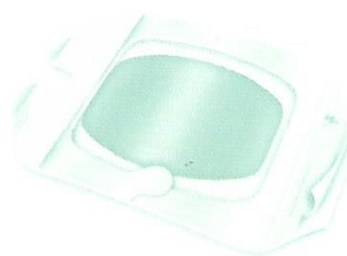

1688 | 10 x 12 cm

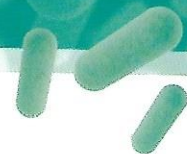


3M™ Tegaderm™

Przezroczyste opatrunki ze wzmocnieniem.

- wzmocnione obrzeże bez mikronacięć
- nielaminowane włókninowe paski mocujące i metki do oznaczenia
- klej równomiernie naniesiony




1616 | 10 x 12 cm

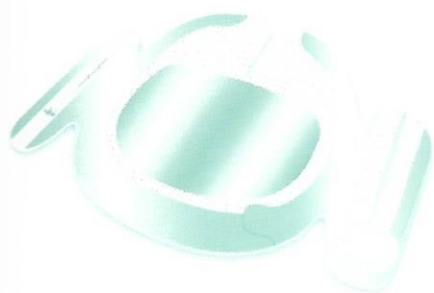

1650 | 10 x 15,5 cm



1655 | 8,5 x 11,5 cm

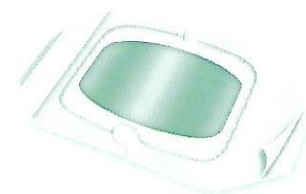


1614 | 6 x 7 cm

3M™ Tegaderm™

Przezroczyste opatrunki z częściowym wzmocnieniem.

- wzmocnienie włókniną części obejmującej kaniulę/cewnik
- nielaminowane włókninowe paski mocujące i metki do oznaczania
- klej równomiernie naniesiony
- kolorowa aplikacja o tematyce dziecięcej

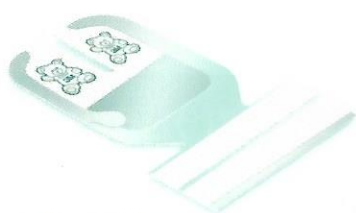

1610 | 5 x 5,7 cm



1633 I.V. | 7 x 8,5 cm



1635 I.V. | 8,5 x 10,5 cm

3 Kroki do prawidłowej aplikacji



- 1. Usuń owłosienie w miejscu aplikacji (dłoń, przedramię, klatka piersiowa, szyja, pachwina) przy użyciu strzygarki elektrycznej.**
Owłosienie na skórze utrudnia opiekę nad miejscem wkłucia, zwiększa częstość wymiany opatrunków, podwyższa koszty terapii oraz powoduje dyskomfort pacjenta podczas wymiany opatrunków.
- 2. Zdezynfekuj skórę i odczekaj do wyschnięcia.**
Środek dezynfekcyjny działa tylko do czasu wyschnięcia. Zdezynfekuj skórę starannie i powoli a zmniejszysz ryzyko zakażenia.
- 3. Naklej opatrunek powoli i starannie.**
Pamiętaj opatrunki przezroczyste posiadają klej wrażliwy na siłę nacisku. Jeśli zależy Ci aby opatrunek dobrze przylegał do skóry bądź dokładny i nie spiesz się. Właściwa stabilizacja katetera to mniejsze ryzyko zakażenia i zapalenia żyły.

Prawidłowa aplikacja to połowa sukcesu
- lepsza stabilizacja katetera, rzadsza wymiana opatrunku, mniejsze ryzyko zakażenia.

Informacje dla zamawiających

Nr kat.	Rozmiar	Ilość w opakowaniu
3M™ Tegaderm™ CHG		
1657R	8,5 x 11,5 cm	25
1658R	10 x 12 cm	25
1659R	10 x 15,5 cm	25
1660R	7 x 8,5 cm	25

3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced		
1681	7 x 8 cm	100
1683	6,5 x 7 cm	100
1685	8,5 x 11,5 cm	50
1688	10 x 12 cm	50

3M™ Tegaderm™ opatrunki ze wzmocnionym obrzeżem		
1614	6 x 7 cm	100
1616	10 x 12 cm	50
1650	10 x 15,5 cm	25
1655	8,5 x 11,5 cm	50

Nr kat.	Rozmiar	Ilość w opakowaniu
3M™ Tegaderm™ opatrunki ze wzmocnieniem		
1610	5 x 5,7 cm	100
1633 I.V.	7 x 8,5 cm	100
1635 I.V.	8,5 x 10,5 cm	50

3M™ Tegaderm™ Diamond Film		
1679	10 x 11,5 cm	100
1684	6 x 7 cm	50
1686	10 x 12 cm	50

3M™ Tegaderm™ tradycyjne opatrunki przezroczyste		
1622W	4,4 x 4,4 cm	100
1623W	6 x 7 cm	100
1624W	6 x 7 cm	100
1626W	10 x 12 cm	50
1630W	10 x 11,5 cm	50

